

Wash-Checks

Chemisches Testsystem zur Überprüfung der Reinigungsleistung von Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) im täglichen Routinebetrieb

Verwendungszweck

Einfach zu verwendendes Testsystem für die Überwachung der Reinigungswirkung bei medizinischen Instrumenten in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG).

Produkt	Best.- Nr.	Packungsgröße	Lagerung	Haltbarkeit
Wash-Checks Halterung	830001	1 Stück		
Wash-Checks Indikatorplättchen	831010 831050 831100	10 Stück 50 Stück 100 Stück	Trocken bei Raumtemperatur	2 Jahre ab Herstellungsdatum

Anwendung/Durchführung

Indikatorplättchen seitlich in die Halterung einschieben. Darauf achten, dass die Vorderseite des Indikatorplättchens mit der roten Testanschmutzung im offenen Teil der Halterung sichtbar bleibt. Zusammengesetztes Testsystem in das RDG einlegen oder einhängen. Die offene Vorderseite muss in das Innere des RDG weisen.



Hinweis: Zur täglichen Routineprüfung das Testsystem immer bei der normalen Beladung mitführen. Auf die korrekte Beladung des RDG achten (Herstellerangaben).

Auswertung

Testsystem nach Ablauf des Programms aus dem RDG nehmen, Indikatorplättchen aus der Halterung ziehen und das Reinigungsergebnis überprüfen.



unbehandelt oder
kritisches Ergebnis



unzureichendes
Reinigungsergebnis



optimales
Reinigungsergebnis

Dokumentation

Das Reinigungsergebnis in das RDG-Tagebuch (Best.-Nr. 840001) eintragen.